

PINCEL PARA TRATAMIENTO DE HONGOS EN UÑAS

PINCEL FUNGEX® PARA TRATAR HONGOS EN LAS UÑAS

- Fórmula de eficacia probada contra los hongos de las uñas
- Elimina los hongos de las uñas en 20 segundos!
- 100% eficaz contra los hongos de las uñas
- Evita la propagación de la infección y ayuda a prevenir la reinfección

Consejos generales: antes de utilizar el Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas, lea atentamente las instrucciones, incluso si ya ha utilizado este producto con anterioridad. La información contenida en un nuevo envase puede haber sido revisada para reflejar los últimos conocimientos y datos científicos. Para obtener buenos resultados, utilice el Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas con cuidado. Conserve estas instrucciones ya que puede necesitar consultarlas durante el tratamiento.

Aplicación: el Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas es un producto sanitario que ayuda en el tratamiento de los hongos en las uñas (onicomicosis). El Píncel FungeX® ha probado su eficacia en el tratamiento de infecciones por hongos en las uñas. Su fórmula exclusiva contiene un «ELIMINADOR INSTANTÁNEO», que penetra profundamente en la superficie de la uña, garantizando la eliminación de los hongos en 20 segundos. El líquido forma una capa sobre la uña, creando un entorno no apto para el crecimiento de hongos y bloqueando la progresión de la infección.

Para conseguir resultados mejores y más rápidos, se recomienda limar cuidadosamente la uña a tratar una vez a la semana. Si interrumpe el tratamiento, los hongos reaparecerán rápidamente. En consecuencia, es importante seguir utilizando el Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas hasta que la infección haya desaparecido.

Dado que los ambientes húmedos son una de las causas de las infecciones por hongos en las uñas, se recomienda utilizar únicamente calcetines confeccionados con materiales absorbentes, como algodón o lana. Esta medida es importante, ya que los mohos suelen encontrarse en ambientes húmedos, donde pueden multiplicarse. Así, en caso de que sufra una infección por hongos en las uñas, es importante que mantenga los pies secos.

Posología y uso (sólo adultos): el Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas es sólo para uso externo. Aplique el producto en la zona afectada dos veces al día (por la mañana y por la noche, por ejemplo) hasta que la uña tratada se haya regenerado por completo. Gracias a la fórmula de eliminación instantánea en 20 segundos, el Píncel aplicador no se infecta con los hongos, evitando la infección o reinfección del resto de uñas y protegiendo contra cualquier recontaminación. El Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas puede combinarse con el uso de antimicóticos orales.

Cómo actúa el producto: gracias a una combinación única de ingredientes, el Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas forma una capa que crea un entorno no apto para el crecimiento de hongos en la placa ungueal. A la vez, el producto forma una barrera física que inhibe la propagación de mohos. El Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas reduce la acidez de la uña, facilitando así un entorno desfavorable que impide el crecimiento y la propagación de hongos.

Uso durante el embarazo y/o la lactancia: no se dispone de información sobre el uso del Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas durante el embarazo o la lactancia. Si está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de usar este producto.

Posibles efectos secundarios: los posibles efectos secundarios incluyen: eritema, irritación, edema, dolor, decoloración de las uñas y onicolisis y reacciones alérgicas.

⚠ ADVERTENCIAS

- Sólo para uso externo.
- Los hongos en las uñas pueden causar eritema, irritación, edema, dolor, decoloración de las uñas y onicolisis.
- Compruebe la lista de ingredientes para saber si es alérgico a alguno de ellos.
- Evite el contacto con los ojos y las mucosas.
- No aplique este producto sobre heridas abiertas o en caso de daños en la piel.
- No vende los dedos con fuerza.
- No aplique calor en la zona de aplicación.
- Las mujeres embarazadas o en período de lactancia deben consultar a un profesional médico antes de utilizar este producto.
- Si experimenta reacciones alérgicas, deje de utilizar el producto.
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- En caso de que el producto no surta efecto, consulte a un médico.

Contiene: 1 Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas 5ml

Composición: agua, etoxidiglicol, ISK1320®, pentilenglicol, alcohol Denat, Tridiceth-9, aceite de ricino hidrogenado PEG-40, alcohol bencilico, limoneno, glicerina, Ntilact®, propilenglicol, PVP, goma Xantana, aceite de hoja de Eucalyptus Globulus, aceite de Lavandula Hybrida, linalol, Dimetil isosorbida, aceite de Citrus Aurantium Dulcis, aceite de Pogostemon Cablin, fosfato sódico, geranial, citral, biotina, cumarina, ácido cítrico, Farnesol.

Cualquier consulta sobre el producto debe dirigirse a su distribuidor. Si desea más información sobre el Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas visite www.fungex.com

FungeX® es una marca registrada de TheOTCLab. El Píncel FungeX® para tratar hongos en las uñas es un producto sanitario de clase 2A de conformidad con la normativa de la UE 2017/745.

 No utilizar después de la fecha de caducidad (véase el envase)

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar este producto.

Última revisión del texto: octubre 2024

Distribuidor
Ortopedia Mogar S.A
Gran Vía Carles III, 98, 4º 3ª
08028 BARCELONA
www.ormogar.com

Fabricante
PK Benelux BV
Vluchttoord 17,
5406 XP Uden,
Países Bajos

