



Leia atentamente o folheto informativo, antes de utilizar FungeX Nail Fungus Brush. Não deite fora este folheto.

PINCEL PARA FUNGOS NAS UNHAS

FUNGEX PINCEL PARA FUNGOS NAS UNHAS

Tratamento clinicamente comprovado para infeções fúngicas das unhas.

Para que serve: FungeX Nail Fungus Brush é um dispositivo médico para o tratamento e prevenção de infeções fúngicas das unhas (onicomicose).

Aplicação: FungeX Nail Fungus Brush é:

- Eficácia clinicamente comprovada contra os fungos das unhas
- Ajuda a prevenir a propagação e reduz o risco de reinfeção
- Melhora o aspeto das unhas (quebradiças, estriadas, espessadas, ásperas ou descoloradas)
- Suaviza e nutre as unhas
- Promove unhas mais fortes e com um aspeto mais saudável.
- Secagem rápida, acabamento invisível - utilização diária discreta

Sobre as infeções fúngicas das unhas: Infeção fúngica das unhas (onicomicose):

- É uma das doenças mais comuns das unhas
- Muitas vezes começa como uma mancha branca ou amarela debaixo da unha
- Pode causar espessamento, fragilidade, sulcos ou descoloração
- Pode propagar-se a outras unhas e ser transmitida a outras pessoas em áreas partilhadas (por exemplo, piscinas, ginásios)

Como funciona o FungeX: FungeX combina a ação antifúngica com o cuidado das unhas:

- **Camada protetora:** cria um ambiente desfavorável ao crescimento dos fungos
- **Função de barreira:** impede a propagação e a reinfeção
- **Efeito pH:** reduz a acidez das unhas, atrasando o desenvolvimento dos fungos.
- Com biotina para manter as unhas mais suaves e com um aspeto mais saudável.

Modo de utilização: Apenas para uso externo. A aplicação em crianças deve ser efetuada por um adulto.

1. limpe e seque a(s) unha(s) afetada(s). Não necessita de limar as unhas.
2. Aplique uma vez por dia com o pincel, cobrindo toda a superfície da unha e, se possível, a parte inferior.
3. Volte a fechar bem a caneta ou o frasco após cada utilização. Deixe secar durante 1-2 minutos. Lave as mãos (exceto na área tratada) imediatamente, após a utilização.

Continue a utilizar diariamente, até que a unha infetada tenha crescido completamente. Pode também ser aplicado preventivamente em unhas saudáveis. O pincel mantém-se limpo e evita a propagação de fungos entre as unhas. Pode ser utilizado juntamente com tratamentos antifúngicos orais, se prescritos.

Dica: a consistência é fundamental. Parar demasiado cedo aumenta o risco de recorrência.

Se os sintomas persistirem ou piorarem, consulte um profissional de saúde

Conselhos úteis de prevenção:

- Mantenha os pés secos, especialmente entre os dedos
- Use meias de algodão ou de lã e mude-as diariamente
- Evite partilhar corta unhas, sapatos ou toalhas
- Não ande descalço nas zonas comuns

Utilização durante a gravidez e a amamentação: Não existem dados de segurança disponíveis. Se estiver grávida ou a amamentar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar.

Contraindicações: Não utilize se for alérgico a algum dos ingredientes listados. Não aplique na pele aberta ou danificada devido ao risco de irritação ou infeção. Consulte um médico antes de utilizar se tiver diabetes, má circulação ou um sistema imunitário enfraquecido.

Efeitos secundários possíveis: Raros: vermelhidão, irritação, comichão,

inchaço, dor, descolamento das unhas ou reações alérgicas (por exemplo, erupção cutânea). Se ocorrer uma reação alérgica, interrompa imediatamente a utilização e consulte um médico.

AVISOS E PRECAUÇÕES Apenas para uso externo. Evite o contacto com os olhos e as membranas mucosas. Não aplique em feridas abertas ou pele gretada. Não faça ligaduras apertadas, nem aplique calor na zona tratada. Não exponha as unhas tratadas a luz solar intensa imediatamente após a aplicação.

Armazenamento: Conserve num local seco à temperatura ambiente (5-25°C). Evite a inalação de vapores. Manter fora do alcance das crianças. Não utilize após o prazo de validade indicado na embalagem.

Contém: 1 FungeX Nail Fungus Brush com 5ml de solução. Um frasco de 5 ml permite aproximadamente 250 aplicações. Suficiente para vários meses de utilização diária numa unha afetada

Ingredientes: Ethyl Lactate, Glycerin, Aqua, Lactic Acid, Biotin

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Os sinais e símbolos de aviso na embalagem e as instruções de utilização são essenciais para garantir que utiliza este produto de forma segura e correta e para o proteger a si e a outros de lesões. Os símbolos são explicados na tabela seguinte:

Símbolo	Explicação
	Símbolo do fabricante
	Símbolo que indica que deve consultar as instruções de utilização
	Símbolo que indica que é necessário ter cuidado ao utilizar o dispositivo
	Símbolo da data de validade
	Símbolo que indica que o artigo é um dispositivo médico
	Símbolo que indica o identificador único do dispositivo
	Símbolo do número de lote
	Não se destina a crianças com idade igual ou inferior a 4 anos
	Manter fora do alcance das crianças
	Não recomendado a mulheres grávidas ou a amamentarem
	O produto deve ser armazenado entre 5 °C e 25 °C

Qualquer incidente grave relacionado com este produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado Membro, onde o utilizador estiver localizado.

Elimine a embalagem e as peças usadas em conformidade com os regulamentos específicos do país.

Para mais informações sobre o FungeX, visite www.fungex.com. Para todas as questões relativas a produtos, contacte o distribuidor.

Fabricante
TheOTCLab
Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
The Netherlands
www.theotclab.com

Distribuidor
Laboratórios Expanscience
Avenida Dom João II, 15
e 17, 3.º andar,
L-N, Loja 6 D
1990-078 Lisboa
Portugal

0482

V9773809_25K1