



Por favor, leia atentamente o folheto antes de utilizar FungeX Caneta para fungos. Não deitar fora este folheto.

CANETA PARA FUNGOS NAS UNHAS

FUNGEX CANETA PARA FUNGOS NAS UNHAS

- Fórmula clinicamente comprovada contra os fungos nas unhas
- Elimina os fungos em 20 segundos!
- Previne a propagação da infeção e ajuda a prevenir a reinfeção

Advertências: Leia com atenção este folheto antes de começar a utilizar o FungeX Caneta para Fungos nas Unhas, mesmo que já tenha utilizado este dispositivo médico anteriormente. A informação contida na nova embalagem foi revista de acordo com os últimos dados científicos. Deve utilizar FungeX Caneta para Fungos nas Unhas segundo os conselhos de utilização para obter resultados. Não deite fora este folheto informativo – pode precisar de o ler durante o seu tratamento.

FungeX Caneta para Fungos nas Unhas é um dispositivo médico que ajuda no tratamento de fungos nas unhas (onicomicose). FungeX Caneta para Fungos nas Unhas demonstrou eficácia contra nas infeções fúngicas das unhas. A fórmula única contendo um 'INSTANT KILLER', tem ingredientes que penetram na superfície da unha, eliminando os fungos em 20 segundos. O líquido forma uma camada na unha, criando um ambiente que é desfavorável ao crescimento de fungos e funciona como uma barreira física para evitar a propagação dos mesmos.

Para obter resultados, recomenda-se limar cuidadosamente a superfície da unha uma vez por semana. Se o tratamento for interrompido, o fungo poderá reaparecer. Por isso, é importante continuar a utilizar FungeX Caneta para Fungos nas Unhas até que a unha seja renovada.

Como os ambientes húmidos são uma das causas das infeções fúngicas das unhas, recomenda-se a utilização de meias absorventes de algodão ou lã. Isto é importante, uma vez que os fungos são geralmente encontrados em ambientes húmidos, onde podem desenvolver-se. Se tiver uma infeção fúngica, é importante manter os pés secos.

Conselhos de utilização (apenas para adultos): FungeX Caneta para Fungos nas Unhas é apenas para uso externo. Aplique o produto na unha afetada duas vezes por dia (de manhã e à noite) até que a unha com infeção fúngica seja renovada. Graças à formulação instantânea de 20 segundos, a caneta não fica contaminada com o fungo, prevenindo a infeção/reinfeção das outras unhas e protegendo contra do reaparecimento do fungo. FungeX Caneta para Fungos nas Unhas pode ser utilizado ao mesmo tempo que utiliza antimicóticos orais.

Modo de ação: Graças a uma combinação única de ingredientes, o FungeX Caneta para Fungos nas Unhas forma uma camada, o que cria um ambiente desfavorável para o crescimento de fungos na placa de unha. Também forma uma barreira física que inibe a propagação dos fungos. O FungeX Caneta para Fungos nas Unhas reduz a acidez da unha, criando um ambiente desfavorável que impede o crescimento e a propagação de fungos.

Utilização durante a gravidez e/ou amamentação: Não existe informação disponível sobre a utilização de FungeX Caneta para Fungos nas Unhas durante a gravidez ou fase de amamentação. Se estiver grávida ou a amamentar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar.

Efeitos Adversos Possíveis: Os efeitos adversos possíveis são: eritema, irritação, edema, dor, descoloração das unhas e onicólise; reações alérgicas.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Uso externo.
- Os fungos nas unhas podem causar eritema, irritação, edema, dor, descoloração das unhas e onicólise.
- Verificar a lista de ingredientes para saber se é alérgico a algum dos ingredientes contidos no produto.
- Evitar o contacto com os olhos e mucosas.
- Não aplicar em feridas ou em pele danificada.
- Não adequado para bebés e crianças
- Não expor a área a tratar ao calor.
- Consultar o médico, se está grávida ou a amamentar, antes de utilizar FungeX Caneta para Fungos nas Unhas.
- Em caso de reação alérgica, interromper a utilização do produto.
- Manter fora do alcance e da vista das crianças.
- Em caso de não obter qualquer melhoria, consultar o médico.

Contém: 1 Caneta para Fungos nas Unhas FungeX com 4 ml

Ingredients: Aqua, Ethoxydiglycol, ISK1320, Pentylen Glycol, Alcohol Denat, Tridiceth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, Limonene, Glycerin, Ntilact, Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Dimethyl Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, Citric Acid, Farnesol.

Todos as questões sobre o produto devem ser enviadas ao distribuidor. Para mais informações sobre FungeX Caneta para Fungos nas Unhas, visite www.fungex.com

FungeX é uma marca registada TheOTCLab. FungeX Caneta para Fungos nas Unhas é um dispositivo médico de classe 2A de acordo com o regulamento da UE 93/42/CE.

 Não utilizar após a data de validade (ver embalagem)

Leia o folheto informativo antes de utilizar este Dispositivo Médico.

Data da última revisão : setembro de 2020

DISTRIBUIDOR
Laboratórios Expanscience
Avenida Dom João II, 15 e 17, 3.º andar, L-N, Loja 6 D
1990-078 Lisboa Portugal

FABRICANTE
PK Benelux BV
Vluchttoord 17, 5406 XP Uden
The Netherlands



074276_V1.0
V9772808/25C1

WWW.FUNGEX.COM