

PERO NA MYKÓZU NEHTŮ

CZ FUNGEX PERO NA MYKÓZU NEHTŮ
Klinicky ověřená léčba plísňových infekcí nehtů.

K čemu se používá: FungeX pero na mykózu nehtů je zdravotnický prostředek určený k léčbě a prevenci plísňových infekcí nehtů (onychomykózy).

Aplikace: Přípravek FungeX pero na mykózu nehtů:

- Má klinicky ověřenou účinnost proti mykóze nehtů
- Pomáhá bránit šíření a snižuje riziko opětovné infekce
- Zlepšuje vzhled nehtů (křehké, rýhované, zhrublé, drsné nebo zabarvené)
- Zjemňuje a vyživuje nehty
- Podporuje silnější nehty se zdravějším vzhledem
- Zajišťuje rychleschnoucí, neviditelný povrch – diskrétní pro každodenní použití

O plísňových infekcích nehtů: Plísňová infekce nehtů (onychomykóza):

- Je jedním z nejčastějších onemocnění nehtů
- Často začíná jako bílá nebo žlutá skvrna pod nehtem
- Může způsobit zhrubnutí, křehkost, rýhy nebo změnu barvy nehtu
- Může se rozšířit na další nehty a přenést se na ostatní osoby ve společných prostorách (např. bazény, tělocvičny)

Jak FungeX funguje: FungeX kombinuje antimykotický účinek s péčí o nehty:

- **Ochranná vrstva:** vytváří prostředí nepříznivé pro růst plísní
 - **Bariérová funkce:** brání šíření a opětovné infekci
 - **pH efekt:** snižuje kyselost nehtů, čímž zpomaluje rozvoj plísní
- S biotinem pro hladší a zdravěji vypadající nehty

Pokyny k použití: (pouze pro dospělé osoby)

1. Očistěte a osušte postižené nehty. Není nutné nehty pilovat.
2. Opatrně otočte zadní část pera, dokud se neuvolní kapka tekutiny.
3. Aplikujte jednou denně pomocí přesného kartáčku. Je-li to možné, naneste přípravek na celou plochu nehtu a jeho spodní stranu.
4. Po každém použití pero znovu dobře uzavřete. Nechte 1–2 minuty zaschnout. Ihned po použití si umyjte ruce (kromě ošetřované oblasti).

Opakujte aplikaci každý den, dokud infikovaný nehet zcela nedoroste. Lze také aplikovat preventivně na zdravé nehty. Pero zůstává čisté a zabraňuje šíření plísní na další nehty. Může se používat současně s perorální antimykotickou léčbou, pokud je předepsána.

Tip: Důslednost je klíčová. Příliš brzké ukončení léčby zvyšuje riziko recidivy.

Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, obraťte se na lékaře

Užitečné tipy pro prevenci:

- Udržujte nohy v suchu, zejména mezi prsty
- Noste bavlněné nebo vlněné ponožky a denně je měňte
- Vyhněte se sdílení kličiček na nehty, obuvi nebo ručníků
- Nechoďte bosí ve společných prostorách

Použití během těhotenství a kojení: Nejsou k dispozici žádné údaje o bezpečnosti. Pokud jste těhotná nebo kojíte, poraďte se před použitím s lékařem nebo lékárníkem.

Kontraindikace: Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na některou z uvedených složek. Nepoužívejte na otevřené rány a poškozenou pokožku kvůli riziku podráždění nebo infekce. Před použitím se poraďte s lékařem, pokud trpíte cukrovkou, potížemi s krevním oběhem nebo oslabeným imunitním systémem.

Možné nežádoucí účinky: Vzácně: zarudnutí, podráždění, svědění, otok, bolest, uvolnění nehtů nebo alergické reakce (např. vyrážka). Pokud se objeví alergická reakce, okamžitě přestaňte přípravek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Pouze k zevnímu použití. Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi. Nepoužívejte na otevřené rány nebo porušenou kůži. Ošetřené místo nebandážujte příliš těsně a nevystavujte ho teplu. Bezprostředně po aplikaci nevystavujte ošetřené nehty silnému slunečnímu záření.

Skladování: Skladujte v suchu při pokojové teplotě (5–25 °C). Vyhněte se vdechování výparů. Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Obsah: 1 pero na mykózu nehtů FungeX s 4 ml roztoku. Jedno pero o objemu 4 ml vystačí přibližně na 250 aplikací. Dostatečné množství pro několikaměsíční každodenní aplikaci na jeden postižený nehet

Složení: Ethyl-laktát, glycerin, voda, kyselina mléčná, biotin

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ Výstražné značky a symboly na obalu a návodu k použití jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a správného používání tohoto výrobku a pro ochranu vás i ostatních osob před zraněním. Symboly jsou vysvětleny v následující tabulce:

Symbol	Vysvětlení
	Symbol pro výrobce
	Symbol, který značí, že je potřeba nahlédnout do návodu k použití
	Symbol, který značí, že při používání výrobku je třeba postupovat opatrně
	Symbol pro datum spotřeby
	Symbol, který značí, že se jedná o zdravotnický prostředek
	Symbol pro jedinečný identifikátor zařízení
	Symbol pro číslo šarže
	Nevhodné pro děti mladší 4 let
	Uchovávejte mimo dosah dětí
	Není určeno pro těhotné a kojící ženy
	Výrobek by měl být skladován při teplotě 5 °C až 25 °C

Jákykoli závažný incident, který se vyskytl v souvislosti s tímto výrobkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel žije.

Obaly a použité součásti zlikvidujte v souladu s předpisy platnými v dané zemi.

Více informací o výrobcích FungeX naleznete na stránkách www.fungex.com. Veškeré dotazy týkající se výrobků směřujte prosím na distributora.

Výrobce
TheOTCLab
Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
Nizozemsko
www.theotclab.com

Distributor
TheOTCLab
Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
Nizozemsko
www.theotclab.com

CE 0482

25J1_2025 10

PERO NA NECHTOVÚ MYKÓZU

SK FUNGEX PERO NA NECHTOVÚ MYKÓZU

Klinicky overená liečba infekcií spôsobených nechtovou mykózou.

Na čo je určené: Pero na nechtoвую mykózu FungeX je zdravotnícka pomôcka na liečbu a prevenciu infekcií spôsobených nechtovou mykózou (onychomykózou).

Použitie: Pero na nechtoвую mykózu FungeX je:

- Klinicky preukázaná účinnosť proti nechtovej mykóze
- Pomáha zabráňovať šíreniu a znižuje riziko opätovnej infekcie
- Zlepšuje vzhľad nechtov (krehké, ryhované, zhrubnuté, drsné, so zmenou farby)
- Zmäkčuje a vyživuje nechty
- Podporuje silnejšie a zdravšie vyzerajúce nechty
- Rýchloschnúci, neviditeľný povrch – diskrétné každodenné použitie

Informácie o infekcii spôsobenej nechtovou mykózou:

Infekcia spôsobená nechtovou mykózou (onychomykóza):

- Je jednou z najčastejších ochorení nechtov
- Často začína ako biela alebo žltá škvrna pod nechtom
- Môže spôsobiť zhrubnutie, krehkosť, ryhy alebo zmenu farby
- Môže sa rozšíriť na ďalšie nechty a preniesť na ostatných v spoločných priestoroch (napr. bazény, telocvične)

Ako FungeX funguje: Pero FungeX kombinuje antimykotický účinok so starostlivosťou o nechty:

- **Ochranná vrstva:** vytvára prostredie nepriaznivé na šírenie mykózy
- **Funkcia bariéry:** zabraňuje šíreniu a opätovnej infekcii
- **Účinek pH:** znižuje kyslosť nechtov, čím spomaľuje rozvoj mykózy.

S biotínom pre hladšie a zdravšie vyzerajúce nechty.

Návod na použitie: (len pre dospelých)

1. Očistite a osušte postihnutý necht (nechty). Pilníkovanie nie je potrebné.
2. Opatrne otáčajte zadnou stranou pera, kým sa neuvolní kvapka tekutiny.
3. Aplikujte raz denne pomocou presného štetca. Ak je to možné, prejdite celý povrch a spodnú stranu nehta.
4. Po každom použití pero znovu riadne uzavrite. Nechajte schnúť 1 až 2 minúty. Po použití si ihneď umyte ruky (okrem ošetrovanej oblasti).

Pokračujte v každodennom používaní, kým infikovaný necht úplne neodrastie. Môže sa preventívne aplikovať aj na zdravé nechty. Pero zostáva čisté a zabraňuje šíreniu plesní medzi nechtami. Môže sa používať spolu s perorálnou antimykotickou liečbou, ak je predpísaná.

Tip: Kľúčom k úspechu je dôslednosť. Predčasný ukončenie liečby zvyšuje riziko recidívy.

Ak príznaky pretrvávajú alebo sa zhoršujú, vyhľadajte lekára

Užitočné tipy na prevenciu:

- Udržujte nohy v suchu, najmä medzi prstami
- Noste bavlnené alebo vlnené ponožky a každý deň si ich meňte
- Vyhnete sa spoločnému používaniu nožníčiek na nechty, topánok alebo uterákov
- V spoločných priestoroch nechodte naboso

Používanie počas tehotenstva a dojčenia:

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o bezpečnosti. Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Kontraindikácie: Nepoužívajte, ak máte alergiu na niektorú z uvedených zložiek. Neaplikujte na otvorené rany alebo na poškodenú pokožku pretože existuje riziko podráždenia alebo infekcie. Ak máte cukrovku, zlý krvný obeh alebo oslabený imunitný systém, poraďte sa pred použitím s lekárom.

Možné vedľajšie účinky: Zriedkavé: začervenanie, podráždenie, svrbenie, opuch, bolesť, odpadnutie nechtu alebo alergická reakcia (napr. vyrážka). Ak sa vyskytne alergická reakcia, ihneď prestaňte

pomôcku používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠ UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA Len na externé použitie. Zabráňte kontaktu s očami a sliznicou. Neaplikujte na otvorené rany alebo poškodenú pokožku. Ošetrovanú oblasť pevne neobvážujte ani nezahrievajte. Bezprostredne po aplikácii nevystavujte ošetrované nechty silnému slnečnému žiareniu.

Skladovanie: Skladujte v suchu pri izbovej teplote (5 až 25 °C). Vyhnete sa vdychovaniu výparov. Uchovávať mimo dosahu malých detí. Nepoužívajte po dátume expirácie uvedenom na obale.

Obsahuje: 1 Pero FungeX Nail Fungus Pen so 4 ml roztoku. Jedno 4 ml pero poskytuje približne 250 aplikácií. Postačuje na niekoľko mesiacov každodenného používania na jeden postihnutý necht

Zloženie: Etyllaktát, glycerín, voda, kyselina mliečna, biotín

VYSVETLIVKY SYMBOLOV Výstražné značky a symboly na obale a návod na použitie sú nevyhnutné na zaistenie bezpečného a správneho používania tohto výrobku a na ochranu vás a ostatných pred zranením. Symboly sú vysvetlené v tabuľke nižšie:

Symbol	Význam
	Symbol výrobcu
	Symbol, ktorý označuje, že si treba prečítať návod na použitie
	Symbol, ktorý označuje, že pri používaní zdravotníckej pomôcky je potrebná opatrnosť
	Symbol pre dátum expirácie
	Symbol, ktorý označuje, že produkt je zdravotnícka pomôcka
	Symbol, ktorý označuje jednoznačný identifikátor pomôcky
	Symbol pre číslo šarže
	Nevhodné pre deti do 4 rokov
	Uchovávať mimo dosahu detí
	Nevhodné pre tehotné ženy a počas dojčenia
	Výrobok sa skladuje pri teplote od 5 °C do 25 °C

Každý závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s týmto výrobkom, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko.

Obaly a použité časti likvidujte v súlade s predpismi platnými v danej krajine.

Ďalšie informácie o spoločnosti FungeX nájdete na www.fungex.com. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa produktu, kontaktujte distribútora.

Výrobca
TheOTClab
Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
Holandsko
www.theotclab.com

Distributor
TheOTClab
Fred Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
Holandsko
www.theotclab.com

CE 0482

25J1_2025 10