

NAIL FUNGUS PLASTER

BA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PRIJE UPOTREBE FUNGEX NAIL FUNGUS PLASTER. NE BACAJTE OVO UPUTSTVO.

- Efikasno tretiranje gljivičnih infekcija nokta
- Brzo vidljivi rezultati
- Jednostavna i precizna primjena
- Nanosi se samo jedanput dnevno
- Osmosatno djelovanje na tretirani nokat

SADRŽAJ OVOG UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. Šta je FungeX Nail Fungus Plaster?
2. Kako koristiti FungeX Nail Fungus Plaster?
3. Moguća neželjena dejstva
4. Trudnoća i dojenje
5. Rok upotrebe i čuvanje
6. Upozorenja
7. Sadržaj pakovanja
8. Sastav

1. ŠTA JE FUNGEX NAIL FUNGUS PLASTER?

FungeX Nail Fungus Plaster je revolucionarni proizvod koji pruža efikasno i intenzivno tretiranje gljivica na noktima i deformisanih noktiju na nogama promijenjene boje. Pruža prirodnu njegu kontinuiranim otpuštanjem aktivnih sastojaka tokom maksimalno 6 – 8 sati. FungeX Nail Fungus Plaster pruža kontinuirano hidrirajuće dejstvo, podstiče bolji izgled deformisanih noktiju promijenjene boje, nježno zaglađuje spoljašnje slojeve nokatne ploče, sprečava razvoj gljivične infekcije promjenom mikrokruženja nokta. Posebno dizajniran oblik flastera pruža praktičnu, jednostavnu i efikasnu primjenu.

FungeX Nail Fungus Plaster tretira i sprečava razvoj gljivica na noktima, poboljšava izgled nokta i smanjuje neujednačenost boje nokta. Klinička ispitivanja sa formulom FungeX pokazala su vidljive rezultate unutar nekoliko nedjelja primjene.

2. KAKO UPOTREBLJAVATI FUNGEX NAIL FUNGUS PLASTER?

Nokte očistite i uklonite kozmetički lak za nokte, prašinu ili masnoću prije svake upotrebe. Nije potrebno turpijanje noktiju prije upotrebe.

1. Nakon uklanjanja plastične prozirne folije (1), uklonite tanku naljepnicu koja se nalazi na flasteru u obliku nokta (2)
2. Postavite flaster u obliku nokta na sredinu nokta kako bi tretman bilo što uspješniji. Uklonite bijelu traku na poledini flastera (3)
3. Čvrsto omotajte bočne strane nokta (na ruci ili nogama) krilcima flastera, a zatim omotajte vrh nožnog prsta ili prsta preostalim gornjim dijelom flastera.
4. Ostavite FungeX Nail Fungus Plaster na noktima 8 sati kako biste osigurali efikasno i intenzivno tretiranje, po mogućnosti tokom noći. Nanesite flaster jednom dnevno na zahvaćene nokte.

Najbolji rezultati vidljivi su uz svakodnevno tretman sve dok je nokat zahvaćen infekcijom. Trajanje tretmana zavisi od stepena zahvaćenosti nokta i treba ga nastaviti dok ne izraste zdrav nokat. U većini slučajeva novi nokat će izrasti unutar 3 – 6 mjeseci.

3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Nema poznatih neželjenih dejstava kada se FungeX Nail Fungus Plaster na noktima upotrebljava prema uputstvu za upotrebu.

4. TRUDNOĆA I DOJENJE

Proizvod ima lokalno djelovanje, stoga se može upotrebljavati tokom trudnoće i dojenja. Za primjenu kod djece prije upotrebe se posavjetujte sa lekarom.

5. ROK UPOTREBE I ČUVANJE

- Čuvajte na hladnom, suhom mjestu u dobro zatvorenoj ambalaži i na sobnoj temperaturi.
- Čuvajte izvan dohvata djece.
- Dobro zatvorite zip-lock kesicu sa preostalim flasterima kako bi se spriječilo isušivanje.

6. UPOZORENJA

- Samo za vanjsku upotrebu.
- Izbjegavajte upotrebu na nadraženoj koži ili koži nakon izlaganja suncu. Izbjegavajte direktan kontakt sa očima, ustima, sluzokožom.
- Prestanite sa upotrebom proizvoda ako koža pocrveni, otekne ili počne da svrbi tokom ili poslije upotrebe.
- Nemojte upotrebljavati flaster ako ste imali neželjenu reakciju na bilo koju vrstu flastera.
- Nemojte upotrebljavati ako ste alergični na neki od sastojaka proizvoda.
- Ako se javi bilo koja ozbiljna nuspojava ili primjetite nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.
- FungeX Nail Fungus Plaster je namijenjen isključivo za odrasle osobe.

7. SADRŽAJ PAKOVANJA: 14 flastera

8. SASTAV: Urea, 1,3-butilen glikol, fumarna kiselina.

Za sva pitanja u vezi sa proizvodom obratite se nositelju potvrde ili proizvođaču.

Za više informacija o upotrebi FungeX Nail Fungus Plaster posjetite www.fungeX.com.

FungeX je registrovani zaštitni znak kompanije TheOTCLab.

Posljednja revizija teksta: Januar 2023.


Nositelj potvrde u Bosni i Hercegovini:
Pontus Pharma d.o.o. Milana
Preloga 12A, 71000 Sarajevo

Broj i datum potvrde:
06-07.4-1-12030-2/25 od
05.12.2025.

EC REP Ovlašteni predstavnik:
Wooshin Lapache D.O.O.
Industrijska Cesta 1J
1290 Grosuplje, Slovenija

Proizvođač:
Wooshin Labottach CO., LTD
Wooshin Labottach CO., LTD.
1907, 1908, 1909, 1807 Daerung
P-Tower I, Digital-ro 288, Guru-gu
Seoul, 08390 Južna Koreja

Proizvodno mjesto:
Wooshin Labottach CO., LTD.
Songdo BRC Smart Valley B
109,914,915,1012,1013,1014,
1015,1018,1019,1020), 30,
Songdomirae-ro- Yeonsu-gu,
Incheon City, Republika Koreja

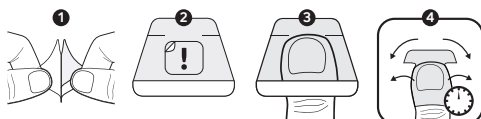

NAIL FUNGUS PLASTER

RS FUNGEX NAIL FUNGUS PLASTER

- Efikasno tretiranje gljivičnih infekcija nokta
- Brzo vidljivi rezultati
- Jednostavna i precizna primena
- Nanosi se samo jedanput dnevno
- 8-časovni kontinuirani tretman

SADRŽAJ OVOG UPUTSTVA ZA UPOTREBU

1. Šta je FungeX Nail Fungus plaster?
2. Kako koristiti FungeX Nail Fungus plaster
3. Moguća neželjena dejstva
4. Trudnoća i dojenje
5. Rok upotrebe i čuvanje
6. Upozorenja
7. Sadržaj pakovanja
8. Sastav

1. ŠTA JE FUNGEX NAIL FUNGUS PLASTER?

FungeX Nail Fungus plaster je revolucionarno medicinsko sredstvo koje pruža efikasno i intenzivno tretiranje gljivica na noktima i deformisanih noktiju na nogama promenjene boje. Pruža prirodnu negu kontinuiranim otpuštanjem aktivnih sastojaka tokom maksimalno 6 – 8 sati. FungeX Nail Fungus Plaster pruža kontinuirano hidrirajuće dejstvo, podstiče bolji izgled deformisanih noktiju promenjene boje, nežno zaglađuje spoljašnje slojeve nokatne ploče, sprečava razvoj gljivične infekcije promenom mikrookruženja nokta. Posebno dizajniran oblik flastera pruža praktičnu, jednostavnu i efikasnu primenu.


FungeX Nail Fungus Plaster namenjen je tretmanu gljivične infekcije nokta, poboljšava izgled nokta i smanjuje diskoloraciju. Klinička istraživanja sa FungeX formulom pokazala su vidljive rezultate u roku od nekoliko nedelja.

2. KAKO UPOTREBLJAVATI FUNGEX NAIL FUNGUS PLASTER

Nokte očistite i uklonite kozmetički lak za nokte, prašinu ili masnoću pre svake primene. Nije potrebno turpijanje noktiju pre primene.

1. Nakon uklanjanja plastične prozirne zaštite (1), uklonite tanku nalepnicu koja se nalazi na plasteru u obliku nokta (2)
2. Postavite flaster u obliku nokta na sredinu nokta kako bi tretman bilo što uspešniji. Uklonite belu traku na poleđini flastera (3)
3. Čvrsto obavijte bočne strane nokta (na ruci ili nogama) krlcima flastera, a zatim obavijte prst ili prst na nozi preostalim gornjim delom.
4. Ostavite FungeX Nail Fungus Plaster na noktima 8 sati kako biste osigurali efikasno i intenzivno tretiranje, po mogućnosti tokom noći. Nanesite flaster jednom dnevno na zahvaćene nokte.

Najbolji rezultati vidljivi su uz svakodnevni tretman sve dok je nokat zahvaćen infekcijom. Trajanje tretmana zavisi od stepena zahvaćenosti nokta i treba ga nastaviti dok ne izraste zdrav nokat. U većini slučajeva novi nokat će izaći u roku od 3 – 6 meseci.

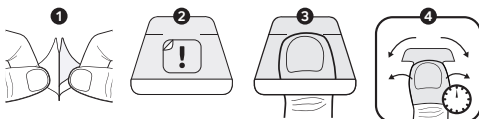

3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Nema poznatih neželjenih dejstava kada se FungeX Nail Fungus Plaster upotrebljava prema uputstvu za upotrebu.

4. TRUDNOĆA I DOJENJE

Proizvod ima lokalno delovanje, stoga se može upotrebljavati tokom trudnoće i perioda dojenja. Za primenu kod dece konsultujte se sa lekarom pre početka tretmana.

5. ROK UPOTREBE I ČUVANJE

- Čuvajte na hladnom, suvom mestu u dobro zatvorenoj ambalaži, i na sobnoj temperaturi.
- Čuvajte van domašaja dece.
- Dobro zatvorite zip-lock kesicu sa preostalim flasterima kako bi se sprečilo sprečilo isušivanje.

⚠ 6. UPOZORENJA

- Samo za spoljašnju upotrebu.
- Izbegavajte upotrebu na iritiranoj koži ili koži izgoreloj od sunca. Izbegavajte direktan kontakt sa očima, ustima, sluzokožom, ranama ili upaljenom kožom.
- Prestanite sa upotrebom proizvoda ako koža pocrveni, otekne ili počne da svrbi tokom ili posle upotrebe.
- Nemojte upotrebljavati flaster ako ste imali neželjenu reakciju na bilo koju vrstu flastera.
- Nemojte upotrebljavati ako ste alergični na neki od sastojaka.
- Ako se javi bilo koja ozbiljna nuspojava ili primetite nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.
- FungeX Nail Fungus Plaster je namenjen isključivo za odrasle osobe.

7. SADRŽAJ PAKOVANJA: 14 FungeX flastera protiv gljivica na noktima

8. SASTAV: Urea, 1,3-butilenglikol, fumarna kiselina.

Za sva pitanja u vezi sa proizvodom obratite se Ovlašćenom predstavniku proizvođača.
Za više informacija o upotrebi FungeX Nail Fungus plastera posetite www.fungex.com

FungeX je registrovani zaštitni znak kompanije TheOTCLab.

Poslednja revizija teksta: Januar 2023.

Proizvođač:
Wooshin Labottach CO., LTD.
1907,1908,1909,1807 Daerung
P-Tower I, Digital-ro 288, Guru-go
Seoul, 08390, Južna Koreja

Proizvodno mesto:
Wooshin Labottach CO., LTD.
Songdo, BRC Smart Valley B 109, 914
.915, 1012, 1013, 1014, 1015, 1018, 1
019, 1020), 30,
Songdomirae-ro- Yeonsu-gu,
Incheon City
Republika Koreja

Ovlašćeni predstavnik:
Pontus Pharma d.o.o. Beograd
Obiljež venac 15/VIII,
Beograd, Srbija
info@pontus-pharma.com

Broj registracije: 002745860 2024

EC REP Authorized Representative:
Wooshin Lapache D.O.O.
Industrijska Cesta 1J
1290 Grosuplje, Slovenija

