

APÓSITO PARA TRATAMIENTO DE HONGOS - UÑAS

FUNGEX APÓSITO PARA TRATAMIENTO DE HONGOS - UÑAS

- Tratamiento eficaz para las infecciones por hongos en las uñas
- Resultados rápidos y visibles
- Aplicación fácil y precisa
- Aplicar sólo una vez al día
- Cómodo apósito con forma de uña

CONTENIDO DE ESTE PROSPECTO

1. ¿Qué es el Apósito FungeX para tratar hongos en las uñas?
2. Cómo utilizar el Apósito FungeX para tratar hongos en las uñas
3. Posibles efectos secundarios
4. Embarazo y lactancia
5. Caducidad y almacenamiento
6. Advertencias
7. Contenido
8. Composición

1. ¿QUÉ ES EL APÓSITO FUNGEX PARA TRATAR HONGOS EN LAS UÑAS?


El Apósito FungeX para tratar hongos en las uñas es un revolucionario dispositivo médico que proporciona un tratamiento eficaz e intensivo para los hongos de las uñas de las manos y para uñas de pies descoloridas y deformadas. Este apósito FungeX para tratar los hongos de las uñas proporciona un cuidado natural mediante la liberación continua de ingredientes activos durante un máximo de 6-8 horas. El Apósito FungeX para tratar hongos en las uñas proporciona un continuado efecto hidratante, favorece la mejora del aspecto de las uñas descoloridas y deformadas, alisa suavemente las capas externas de la placa ungueal y previene el crecimiento de infecciones fúngicas modificando el microentorno de la uña. La forma especialmente diseñada del apósito permite una aplicación cómoda, sencilla y eficaz.

El Apósito FungeX trata los hongos de las uñas, mejora su aspecto y reduce la decoloración. Las investigaciones clínicas con la fórmula FungeX han mostraron resultados visibles en unas semanas*.

2. CÓMO UTILIZAR EL APÓSITO FUNGEX PARA TRATAR HONGOS EN LAS UÑAS

Antes de cada aplicación, limpie la uña y elimine el esmalte, polvo o aceite. No es necesario limar la uña antes de su uso.

1. Tras retirar el adhesivo plástico transparente (1), retire el adhesivo fino que hay sobre apósito con forma de uña (2).
2. Coloque el parche con forma de uña en el centro de la uña para garantizar un tratamiento adecuado. Retire la tira blanca situada en la parte inferior del apósito (3).
3. Envuelva bien los lados del dedo/la uña con las alas del apósito y, a continuación, envuelva el dedo o la uña con la parte superior restante.
4. Mantenga el Apósito FungeX sobre el dedo/la uña durante 8 horas para garantizar un tratamiento eficaz e intensivo, preferiblemente durante la noche. Aplique el apósito una vez al día sobre la uña afectada.

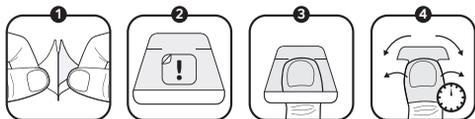

El tratamiento diario de la uña afectada garantiza los mejores resultados. La duración del tratamiento varía en función de la gravedad

de la afección y debe prolongarse hasta que crezca una uña sana. En la mayoría de los casos crecerá una nueva uña en un plazo de 3 a 6 meses.

3. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

No se conocen efectos secundarios en caso de utilizar el Apósito FungeX para tratar hongos en las uñas de acuerdo con las instrucciones de uso.

4. EMBARAZO Y LACTANCIA

La fórmula sólo tiene actividad local, por lo que puede utilizarse durante el embarazo y la lactancia. Para el uso en niños, consulte a su médico antes del tratamiento.

5. CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO

- Conservar en un lugar fresco y seco y en un recipiente hermético a temperatura ambiente.
- No deje el producto al alcance de los niños.
- Vuelva a cerrar bien la cremallera para guardar los apósitos restantes en la bolsa de aluminio y evitar que se sequen.

6. ADVERTENCIAS

- Sólo para uso externo.
- Evite su uso sobre piel irritada o quemada por el sol y el contacto directo con ojos, boca, mucosas, heridas o piel inflamada.
- Deje de utilizar este producto si su piel se enrojece, se hincha o le pica mientras lo utiliza o después de su uso.
- No utilice este apósito en caso de haber experimentado reacciones adversas a cualquier tipo de apósito.
- No utilice este producto en caso de ser alérgico a cualquiera de sus ingredientes.
- Si alguno de los efectos adversos se agrava, o si nota cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.
- El uso del Apósito FungeX para tratar hongos en las uñas está indicada para adultos únicamente.

7. CONTIENE: 14 Apósitos FungeX para tratar hongos en las uñas

8. COMPOSICIÓN: Urea, 1,3-Butilenglicol, ácido fumárico.

FungeX es una marca registrada de TheOTCLab. El Apósito FungeX para tratar hongos en las uñas es un producto sanitario de clase IIa, de conformidad con la normativa de la UE 2017/745.

Cualquier aclaración sobre el producto debe ser enviada al distribuidor. Para más información sobre el Apósito FungeX, por favor visite www.fungex.com. For more information about FungeX Nail Fungus Plaster, please visit www.fungex.com. FungeX es una marca registrada de TheOTCLab. Última revisión del texto: Octubre 2024

Distribuidor

Ortopedia Mogar S.A
Gran Vía Carles III, 98, 4º
3º 08028 BARCELONA
www.ormogar.com

Fabricante

Wooshinlabottach CO., LTD
Songdo BRC Smart Vally B-109, 914, 915,
1012, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020
30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu,
Incheon City, República de Corea

EC REP Representante autorizado

Wooshin Lapache D.O.O.

Industrijska Cesta 1J,
1290 Grosuplje, Eslovenia

