



Před použitím FungeX náplasti na mykózu nehtů si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. Tuto příbalovou informaci nevyhazujte.

FUNGEX NÁPLAST NA MYKÓZU NEHTŮ

CZ FUNGEX NÁPLAST NA NEHTOVOU MYKÓZU

- Účinná léčba plísňových infekcí nehtů
- Rychlé a viditelné výsledky
- Snadná a přesná aplikace
- Aplikujte pouze jednou denně
- Nepřetržitá léčba mykózy nehtů po dobu 8 hodin

Obsah této příbalové informace

1. Co je FungeX náplast na nehtovou mykózu?
2. Zamýšlený účel
3. Jak se FungeX náplast na nehtovou mykózu používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Kontraindikace
6. Těhotenství a kojení
7. Doba použitelnosti a skladování
8. Varování
9. Obsah
10. Složení

1. CO JE FUNGEX NÁPLAST NA NEHTOVOU MYKÓZU?

FungeX náplast na nehtovou mykózu je revoluční zdravotnický prostředek, který zabezpečuje účinnou a intenzivní léčbu plísňových infekcí nehtů a zdeformovaných nehtů (na nohou). FungeX náplast na nehtovou mykózu zabezpečuje přirozenou péči tím, že uvolňuje účinné látky nepřetržitě až 6–8 hodin. FungeX náplast na nehtovou mykózu má stálý hydratační účinek, zlepšuje vzhled deformovaných nehtů s nežádoucím zbarvením, šetrně vyhlazuje vnější vrstvy nehtové ploténky a brání šíření plísňové infekce změnou mikroprostředí nehtu. Speciálně navržený tvar náplasti umožňuje praktickou, jednoduchou a účinnou aplikaci přesně na zasažené místo.

FungeX náplast na nehtovou mykózu léčí plísňovou infekci nehtů, zlepšuje vzhled nehtů a zmírňuje jejich nežádoucí zbarvení. Klinický výzkum přípravků FungeX ukázal viditelné výsledky už po několika týdnech léčby.

2. ZAMÝŠLENÝ ÚČEL

Zdravotní prostředek je určen pro dospělá se suchými, zbarvenými, deformovanými nebo plísňovými nehty.

3. JAK SE FUNGEX NÁPLAST NA NEHTOVOU MYKÓZU POUŽÍVÁ


Nehet před každou aplikací umyjte, odstraňte lak, masť nebo prach. Před použitím náplasti není nutné brousit nehet pilníkem. Před použitím odstraňte veškerý lak na nehty.

1. Po odstranění plastové průsvitné fólie (1) sejměte tenkou fólii, která pokrývá tvarovaný polštářek na nehty (2).
2. Tvarovaný polštářek přiložte na střed nehtu, zajistěte tím přesné lokalizovanou léčbu. Odstraňte bílý proužek na spodní straně náplasti (3).
3. Křídélka náplasti pevně přitlačte po stranách nehtu a potom je ovíňte okolo prstu. Přechýlující horní částí náplasti překryjte špičku prstu.
4. FungeX náplast na nehtovou mykózu nechte nalepenou na nehtu 8 hodin, nejlépe přes noc. Zajistěte tak účinnou a intenzivní léčbu. Náplast aplikujte na postižené nehty jedenkrát denně.

Nejlepších výsledků dosáhnete při každodenní léčbě. Délka léčby se odvíjí od závažnosti onemocnění nehtu. V léčbě je potřeba pokračovat, dokud nevyroste zdravý nehet. Ve většině případů je to 3 až 6 měsíců.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Za předpokladu, že se FungeX náplast na nehtovou mykózu používá podle návodu k použití, nejsou známy žádné nežádoucí účinky.

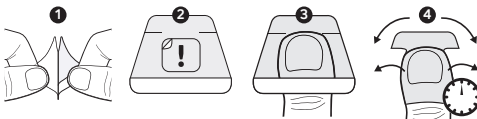

5. KONTRAIKAIKACE

Nepoužívejte na otevřené rány, krvácející vředy ani hluboké řezné rány. Vhodné pouze pro neporušenou kůži nebo nekrvácící povrchové léze, jako jsou suché dermatologické stavy. Nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti na složky. Nepoužívejte během těhotenství a kojení.

6. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ

Přípravek je aktivní pouze lokálně, a proto může být používán během těhotenství a kojení. Použití u dětí konzultujte před léčbou s lékařem.

7. DOBA POUŽITELNOSTI A SKLADOVÁNÍ

- Skladujte na chladném a suchém místě ve vzduchotěsném obalu při pokojové teplotě.
- Neumísťujte balení na místa, kam mohou dosáhnout děti nebo batolata.
- Dobře uzavírejte pro uložení zbývajících náplasti ve fóliovém sáčku, abyste zabránili vyschnutí.

8. VAROVÁNÍ

- Pouze k zevnímu použití.
- Nepoužívejte na podrážděnou nebo spálenou pokožku a při přímém kontaktu s očima, ústy, sliznicí, ranami nebo zanícenou pokožkou.
- Přestaňte používat, pokud vaše pokožka během používání nebo po použití zčervená, otéká nebo svědí.
- Nepoužívejte tuto náplast, pokud se u vás vyskytla nežádoucí reakce na jakýkoli typ náplasti.
- Nepoužívejte, pokud jste alergičtí na některou ze složek náplasti.
- Pokud se některý z nežádoucích účinků stane závažným nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků neuvedených v tomto letáku, sdělte to, svému lékaři nebo lékárníkovi.
- Jakákoli závažná nehoda, ke které dojde v souvislosti s tímto zařízením, musí být neprodleně nahlášena výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, kde má uživatel a/nebo pacient bydliště.
- Neumísťujte obal do dosahu dětí nebo batolata.
- FungeX náplast na nehtovou mykózu je určena pro použití pouze u dospělých.

9. OBSAH: 14 FungeX náplasti na nehtovou mykózu

10. SLOŽENÍ:

Močovina (15,00 %), 1,3-butylenglykol (7,00 %), kyselina fumarová (1,00 %), glycerin, disodná sůl EDTA, kyselina vinná, karboxymethylcelulóza sodná, polysorbát 80, 1,2-hexandiol, částečně neutralizovaný polyakrylát, polyakrylát sodný, glycinát hliníty, voda

S veškerými dotazy ohledně produktů se obraťte na distributora. Další informace o FungeX náplasti na nehtovou mykózu naleznete na webu www.fungex.com

FungeX je registrovaná ochranná známka společnosti TheOTCLab.

Nepoužívejte po datu konce doby použitelnosti (viz obal)
Před použitím tohoto zdravotnického prostředku si přečtěte návod k použití.
Poslední revize textu: prosinec 202


Distributor:

Avepharma s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
www.avepharma.eu

EC REP Authorized Representative
Wooshin Lapache D.O.O.
Industrijska Cesta 1J
1290 Grosuplje, Slovenija

Výrobce

Wooshinlabottach CO., LTD
Songdo BRC Smart Vally B-109,
914,915,1012,1013,1014,1015,
1019,1020
30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu,
Incheon City, Republic of Korea

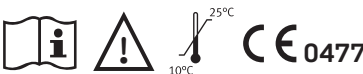

V9771809_26B1
AF2000T1 / V1.0

WWW.FUNGEX.COM

NÁPLAŠŤ NA NECHTOVÚ MYKÓZU FUNGEX

SK NÁPLAŠŤ NA NECHTOVÚ MYKÓZU FUNGEX

- Účinná liečba infekcií spôsobených nechtovou mykózou
- Rýchle a viditeľné výsledky
- Jednoduchá a presná aplikácia
- Aplikujte len raz denne
- Nepretržitá 8-hodinová liečba nechtov

Prehľad pokynov na použitie

1. Čo je to náplasť proti nechtovej mykóze FungeX?
2. Zamýšľaný účel
3. Ako sa náplasť proti nechtovej mykóze FungeX používa
4. Možné vedľajšie účinky
5. Tehotenstvo kojenie
6. Kontraindikácie
7. Trvanlivosť a uchovávanie
8. Pozor
9. Obsahuje
10. Zložky

1. ČO JE TO NÁPLAŠŤ NA NECHTOVÚ MYKÓZU FUNGEX?

Náplasť na nechtovú mykózu FungeX je revolučná zdravotnícka pomôcka, ktorá poskytuje účinnú a intenzívnu liečbu nechtovej mykózy a sfarbených, deformovaných nechtov (na nohách). Táto Náplasť na nechtovú mykózu FungeX poskytuje prirodzenú starostlivosť vďaka nepretržitému uvoľňovaniu účinných látok počas maximálne 6 až 8 hodín. Náplasť na nechtovú mykózu FungeX poskytuje nepretržitý hydratačný účinok, podporuje zlepšenie vzhľadu sfarbených a deformovaných nechtov, jemne vyhladzuje vonkajšie vrstvy nechtového lôžka a zabráňuje šíreniu plesňovej infekcie zmenou mikroprostredia nechtu. Špeciálne navrhnutý tvar náplasti poskytuje pohodlnú, jednoduchú a účinnú aplikáciu zameranú na postihnuté miesta.

Náplasť proti nechtovej mykóze FungeX lieči nechtovú mykózu, zlepšuje vzhľad nechtov a redukuje ich sfarbenie. Klinický výskum s prípravkom FungeX ukázal viditeľné výsledky v priebehu niekoľkých týždňov.

2. ZAMÝŠĽANÝ ÚČEL

Táto zdravotnícka pomôcka je určená pre dospelých so suchými, zafarbenými, deformovanými alebo plesňovými nechtami.

3. AKO SA NÁPLAŠŤ NA NECHTOVÚ MYKÓZU FUNGEX POUŽÍVA


Pred každou aplikáciou necht najprv očistite a odstráňte lak, prach a masť. Pred použitím nechty nie je potrebné pilnkovať. Pred použitím odstráňte všetok lak na nechty.

1. Po odstránení plastovej priehľadnej nálepky (1) odstráňte tenkú nálepku umiestnenú na náplasti v tvare nechta (2).
2. Náplasť v tvare nechta umiestnite na stred nechta, aby ste zabezpečili lokálnu liečbu. Odstráňte biely pásik v spodnej časti z (3).
3. Bočné strany nechta (na nohe) pevne oblepte krídelkami náplasti a potom oblepte prst alebo špičku prsta zvyšnou hornou časťou.
4. Náplasť proti nechtovej mykóze FungeX nechajte pôsobiť na nechtoch (na nohách) 8 hodín, aby sa zabezpečila účinná a intenzívna liečba, najlepšie počas noci. Náplasť aplikujte na postihnuté nechty raz denne.

Najlepšie výsledky sú viditeľné pri každodennej liečbe, kým je necht postihnutý. Trvanie liečby sa líši podľa závažnosti ochorenia a mala by pokračovať, kým nevyrastie zdravý necht. Vo väčšine prípadov nový necht vyrastie do 3 až 6 mesiacov.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Ak sa Náplasť na nechtovú mykózu FungeX používa v súlade s návodom na použitie, nie sú známe žiadne vedľajšie účinky.

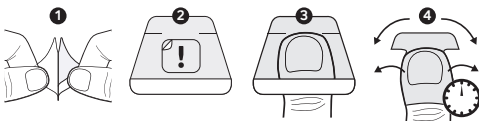

5. TEHOTENSTVO A KOJENIE

Prípravok je aktívny len lokálne, preto sa počas tehotenstva a kojenia môže používať. Použitie u detí konzultujte pred liečbou s lekárom.

6. KONTRAINDIKÁCIE

Nepoužívajte na otvorené rany, krvácajúce vredy alebo hlboké rezné rany. Vhodné len na neporušenú pokožku alebo nekrvávajúce povrchové lézie, ako sú suché dermatologické stavy. Nepoužívajte v prípade známej precitlivosti na zložky. Nepoužívajte počas tehotenstva a dojčenia.

7. TRVANLIVOSŤ A UCHOVÁVANIE

- Uchovávajte na chladnom, suchom mieste, vo vzduchotesnej nádobe, pri izbovej teplote.
- Balenie neumiestňujte na miesta, kde naň môžu dosiahnuť deti alebo batoláta.
- Zipsový uzáver dobre uzavrite, aby ste mohli zvyšné náplasti uskladniť vo fóliovom vrecku a zabrániť ich vysušeniu.

8. POZOR

- Len na vonkajšie použitie.
- Nepoužívajte na podráždenú alebo spálenú pokožku a pri priamom kontakte s očami, ústami, sliznicou, ranami alebo zapálenou pokožkou.
- Prestaňte používať, ak vám pokožka počas používania alebo po použití sčerveneá, opuchne alebo bude svrbieť.
- Nepoužívajte túto náplasť, ak sa u vás vyskytla nežiaduca reakcia na akýkoľvek typ náplasti.
- Nepoužívajte, ak máte alergiu na niektorú zo zložiek.
- Ak sa niektorý z vedľajších účinkov stane závažným alebo ak si všimnete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré v tomto letáku nie sú uvedené, informujte svojho lekára alebo lekárnika.
- Akákoľvek vážna nehoda, ku ktorej dôjde v súvislosti s používaním zariadenia, musí byť bezodkladne nahlásená výrobcovi a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient bydlisko.
- Neumiestňujte balenie na miesta, kde k nemu majú prístup deti alebo batoláta.
- Náplasť proti nechtovej mykóze FungeX je určená len na použitie dospelými osobami.

9. OBSAHUJE: 14 náplasti na nechtovú mykózu FungeX.

10. ZLOŽKY:

Močovina (15,00 %), 1,3-butylénglykol (7,00 %), kyselina fumarová (1,00 %), glycerín, disodná soľ EDTA, kyselina vínna, karboxymetylcelulóza sodná, polysorbát 80, 1,2 hexandiol, čiastočne neutralizovaný polyakrylát, polyakrylát sodný, glycinát hlinitý, voda

Všetky otázky týkajúce sa produktu treba zasielať distribútorovi. Ďalšie informácie o Náplasti na nechtovú mykózu FungeX nájdete na stránke www.fungex.com

FungeX je registrovaná ochranná známka spoločnosti TheOTCLab. Nepoužívajte po dátume expirácie (pozri obal)

Pred použitím tejto zdravotníckej pomôcky si prečítajte návod na použitie.

Posledná revízia textu: december 2021

Distribútor:

Avepharma s.r.o.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
www.avepharma.eu

EC REP Authorized Representative
Wooshin Lapache D.O.O.
Industrijska Cesta 1J
1290 Grosuplje, Slovenija

Výrobca

Wooshinlabottach CO., LTD
Songdo BRC Smart Vally B-109,
914,915,1012,1013,1014,1015,
1019,1020
30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu,
Incheon City, Republic of Korea



V9771809_26B1
AF2000T1 / V1.0